



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "ANDREA MANTEGNA"

SEDE LEGALE VIA FURA, 96 C.F. 98092990179 - 25125 BRESCIA

TEL. 030.3533151 – 030.3534893 FAX 030.3546123

[bsis031005@istruzione.it](mailto:bsis031005@istruzione.it) [bsis031005@pec.istruzione.it](mailto:bsis031005@pec.istruzione.it)

[www.istitutomantegna.edu.it](http://www.istitutomantegna.edu.it)



## Mod. Sic. 23 VERIFICA PERIODICA DEL DEFIBRILLATORE

### Dati relativi al dispositivo

Posizione

Comune

BRESCIA

Prov.

BRESCIA

Indirizzo\*

VIA FURA 91 colonna atrio lato nord di fronte al centralino

Tipologia

Marca (costruttore)

PHILIPS

Modello

HEARTSTART HS1

Numero serie

A 14B-03149

### Esiti della verifica

- a) Funzionalità del defibrillatore:  Si  No
- b) Stato della batteria  Si  No  Non applicabile
- c) Scadenza degli elettrodi  Elettrodi non presenti  Elettrodi scaduti
- Elettrodi in scadenza (scadenza inferiore ai 2 mesi)
- Elettrodi validi (scadenza superiore ai 2 mesi)
- d) Funzionalità della teca  Si  No  Non applicabile
- e) Posizione della teca  Si  No  Non applicabile

Note

### Dati relativi alla verifica

Data

Ora

Cognome e nome operatore

Firma

**Per tutte le attività sotto indicate, fare riferimento al manuale d'uso della Ditta costruttrice o rivenditrice del defibrillatore.**

Oggetto della verifica	Modalità di verifica	Azioni
<b>Funzionalità del defibrillatore</b>	Verificare l'indicatore visivo presente sul defibrillatore e l'attivazione dell'allarme sonoro.	La verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto rilevabile sia visivamente sia acusticamente (eventuale attivazione dell'allarme). Gli indicatori visivi sono diversi in relazione al diverso modello di defibrillatore (fare riferimento al manuale d'uso della Ditta costruttrice o rivenditrice).
<b>Stato della batteria</b>	Verificare l'indicatore del livello della batteria.	Fare riferimento al manuale d'uso della Ditta costruttrice o rivenditrice del defibrillatore. E' possibile che il dispositivo mostri l'indicazione progressiva dello stato della batteria o meno. In caso di assenza dell'indicatore, fare riferimento all'indicatore visivo generale (rif. punto precedente) che, per questi modelli, comprende anche l'eventuale indicazione di batteria esausta.
<b>Scadenza degli elettrodi</b>	Verificare la data di scadenza degli elettrodi, riportata sulla confezione.	Senza scollegare gli elettrodi (se possibile), verificare la data di scadenza degli stessi. Se prossimi alla scadenza/scaduti, provvedere alla tempestiva sostituzione (fare riferimento alla Ditta costruttrice o rivenditrice del defibrillatore).
<b>Funzionalità della teca</b>	Verificare quanto visualizzato sul display della teca, ove presente.	Fare riferimento al manuale d'uso della Ditta costruttrice o rivenditrice del defibrillatore. Verificare visivamente la teca, al fine di rilevare eventuali danni materiali evidenti (dovuti a deterioramento, manomissione, etc.) Di norma, il display della teca riporta alcune informazioni relative allo stato degli apparati interni: verificare la presenza di messaggi di errore/anomalia e di altri messaggi. In caso di teca non dotata di display, limitarsi alla verifica visiva della teca, come sopra indicato.
<b>Posizione della teca</b>	Verificare che la teca si trovi nella posizione prevista	Verificare visivamente che la teca si trovi ancora nella posizione prevista, ossia che non sia stata spostata. Nel caso, evidenziare l'informazione sulla scheda, riportando i riferimenti della nuova collocazione (indirizzo e ogni informazione utile alla precisa definizione) e provvedere alla comunicazione alla AAT (Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU di riferimento.